



NexxZr.T Multi

多功能美学
多种适应症

多功能美学
多种适应症

NexxZr® T Multi



NexxZr® T Multi 是最新一代的牙科多层氧化锆 (3Y-TZP 牙颈部, 5Y-TZP 切端)。

具有非常高的抗弯强度 (1200 MPa 牙颈部, 650 MPa 切端) 与渐变的颜色和透明度相结合, 使之与众不同。这种组合为制造全态或解剖学上修复的单牙和牙桥修复体提供了最佳条件。特别研发的多层色概念, 以流畅的梯度从齿颈部到切端改变材料的机械和光学特性。即使是大范围修复体, 高质量的生产工艺也能提供无张力烧结和高精准度密合。

技术参数



类型
5Y-TZP (切端)
3Y-TZP (牙颈部)



抗弯强度
650 MPa (切端)
1200 MPa (牙颈部)



透明度
49% (切端)
41% (牙颈部)




适应症
单冠到多单位牙桥




易加工技术
内染色技术
外染色技术
回切技术

特点

1 流畅的颜色和透明度渐变 多功能美学

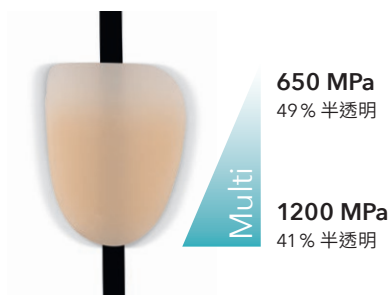

中等透明度

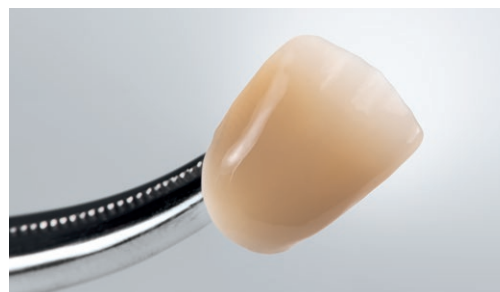

自然过渡的颜色和透明度渐变

2 高强度 广泛的适应症



单冠到多单位牙桥, 全部适用一款材料



3 高质量的生产工艺 无张力烧结不变形, 且能做到高精度密合度




即使是大范围修复体, 也能实现高精度的密合度




通过均匀冷压成型工艺 (CIP) 制造

多层色概念

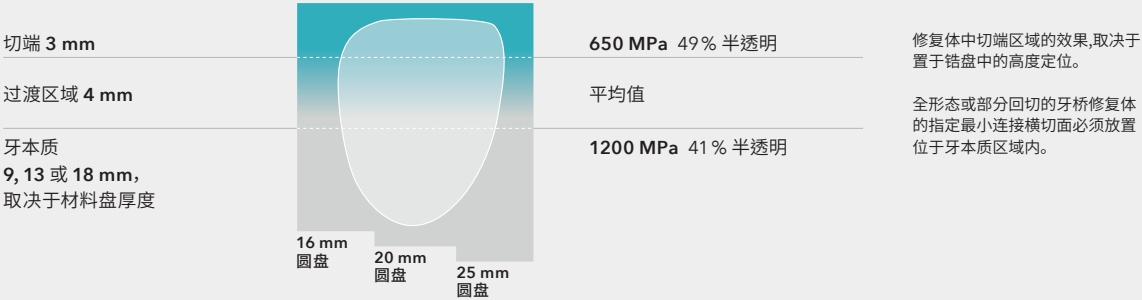

烧结程序

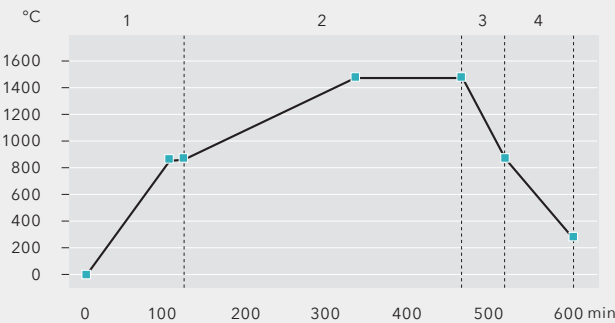

阶段	温度 °C °F	加热/冷却速率 °C/min. °F/min.	保持时间 min.
1	20 - 900 68 - 1652	10 18	30
2	900 - 1500 1652 - 2732	3.3 5.94	120
3	1500 - 900 2732 - 1652	10 18	-
4	900 - 300 1652 - 572	8.3 14.94	-



有关更多详细信息,请参阅 NexxZr 使用说明。



sagemax.com/eifu

包装规格

材料形状 W-98, Z-95	厚度 16, 20, 25 mm	颜色 BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
--------------------	---------------------	--

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com