



NexxZr.T Multi

多功能美學。
多種適應症。

多功能美學。
多種適應症。

NexxZr® T Multi



NexxZr® T Multi 是最新一代的牙科多層氧化鋯 (3Y-TZP 齒頸部, 5Y-TZP 切端)。

具有非常高的抗彎強度 (1200 MPa 齒頸部, 650 MPa 切端) 與漸變的顏色和透明度相結合, 使之與眾不同。這種組合為製造全態或解剖學上修復的單牙和牙橋膺復體提供了最佳條件。特別研發的多層概念, 以流暢的梯度從齒頸部到切端改變材料的機械和光學特性。即使是大範圍膺復體, 高品質的生產工藝也能提供無張力燒結和高精準度密合。

技術參數



類型
5Y-TZP (切端)
3Y-TZP (齒頸部)



抗彎強度
650 MPa (切端)
1200 MPa (齒頸部)



透明度
49 % (切端)
41 % (齒頸部)




適應症
單冠到多單位牙橋




加工技術
滲透技術
染色技術
回切技術

重點

1 流暢的顏色和透明度漸變 多功能美學

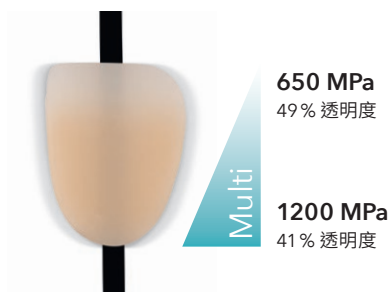

中等透明度

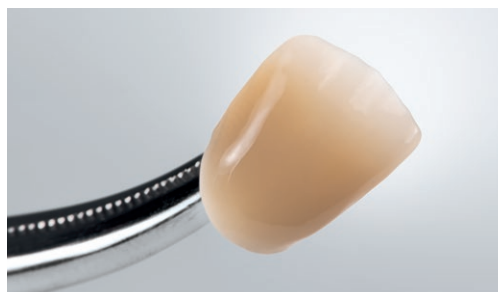

流暢的顏色和透明度漸變

2 高強度 廣泛的適應症



單冠到多單位牙橋，全部適用一款材料



3 高品質的生產工藝 無張力燒結不變形，且能高精準度密合




即使是大範圍修復體，也能實現高精準度密合




通過冷均壓成型工藝 (CIP) 製造

多層概念

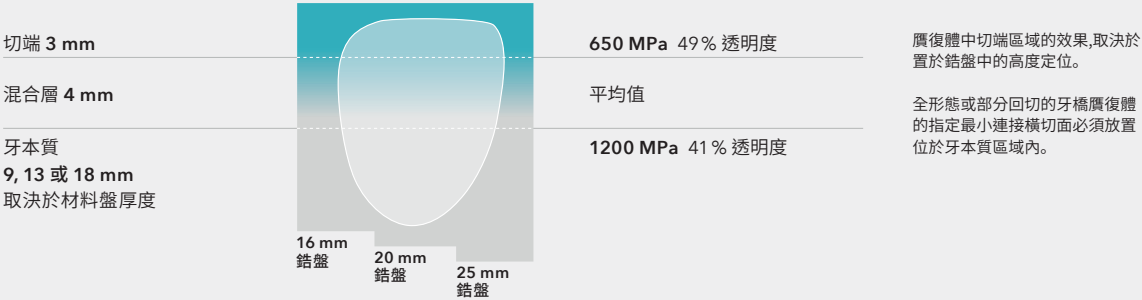

燒結程序

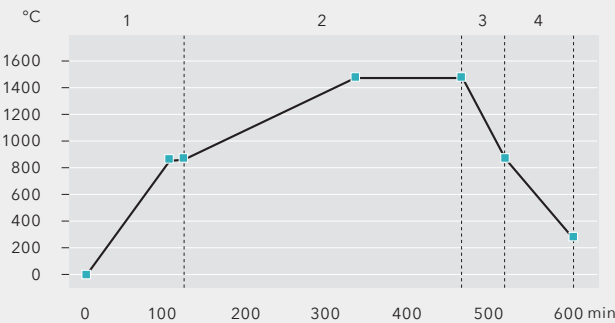

階段	溫度 °C °F	加熱/ 冷卻速率 °C / min. °F / min.	停留時間 min.
1	20 - 900 68 - 1652	10 18	30
2	900 - 1500 1652 - 2732	3.3 5.94	120
3	1500 - 900 2732 - 1652	10 18	-
4	900 - 300 1652 - 572	8.3 14.94	-



更多詳細信息, 請參閱 NexxZr 使用說明。



sagemax.com/eifu

交貨形式

材料形狀 W-98, Z-95	厚度 16, 20, 25 mm	顏色 BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
--------------------	---------------------	--

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com