



NexxZr.T

Przezierność.
Wysoka wytrzymałość.

Przezierność.
Wysoka wytrzymałość.

NexxZr® T



NexxZr® T to dentystyczny tlenek cyrkonu (3Y-TZP) o bardzo wysokiej wytrzymałości na zginanie (1270 MPa) i średniej przezierności (42 %).

Ta kombinacja umożliwia maksymalną różnorodność zastosowań do wykonywania monolitycznych i anatomicznie zredukowanych uzupełnień pojedynczych zębów i mostów. Jakość miękkiego materiału dysku pozytywnie wpływa na żywotność narzędzi frezarskich i zapewnia bezproblemową separację i obróbkę końcową. Dzięki tym właściwościom NexxZr T zapewnia korzyści ekonomiczne użytkownikom w laboratorium. Sprawdzone właściwości produktowe materiału zostały kilkakrotnie uhonorowane nagrodą Dental Advisor Award „Long-Term-Performer Esthetic Zirconia”.

Dane techniczne



Rodzaj
3Y-TZP



Wytrzymałość
na zginanie
1270 MPa



Przezierność
42 %



Wskazania
Odbudowy
jednopunktowe
do mostów
wielopunktowych



Techniki
przetwarzania
Technika infiltracji
Technika barwienia
Technika cut-back
Technika warstwowania

1 **Bardzo wysoka wytrzymałość w połączeniu ze średnią przeziernością** Maksymalna różnorodność zastosowań



1270 MPa
42 % Przezierność

Średnia przezierność



Efekty estetyczne przy maksymalnym zakresie zastosowań

2 **Nagroda Doradcy Stomatologicznego** Wydajność produktu sprawdzona przez lata

Nagradzane funkcje:

Naturalnie wyglądający

Ze względu na wysoką przezierność NexxZr T jest naturalnie wyglądający, a jednocześnie bardzo estetyczny.

Silny

W długoterminowym (3-letnim) badaniu DENTAL ADVISOR praktycznie nie odnotowano żadnego zużycia.



Źródło: © The Dental Advisor


3 **Jakość miękkiego materiału dysku** Wysoka skuteczność i ekonomiczność



Bezproblemowa separacja i bardzo dobra obrabialność



Zoptymalizowane właściwości materiału zapewniające długą żywotność narzędzi frezarskich

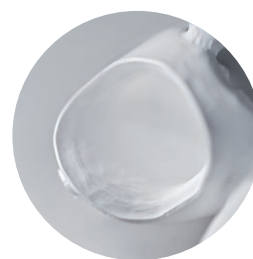

Doskonałe wyniki frezowania i ostre krawędzie

Programy synteryzacji

	Liczba punktów	Czas trwania	Faza	Temperatura	Szybkość grzania/ chłodzenia	Czas trzymania
		h		°C	°C/min.	min.
Standard	1-5	~ 3,7	1	20-1300	30	30
			2	1300-1530	40	60
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
	5-10	~ 5,2	1	20-1300	30	60
			2	1300-1530	40	120
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
Długie	1-20	~ 10,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	150
			3	1530-80	8	-
	>21	~ 11,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	210
			3	1530-80	8	-
Nocny	Nieograniczony	~ 14,3	1	20-250	2	-
			2	250-1530	4	240
			3	1530-80	8	-



Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji obsługi NexxZr.



sagemax.com/eifu

Forma dostawy

Geometrie
W-98, Z-95

Grubości
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Kolory
Biały, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com