

sagemax.com

sagemax®



PressCeramic

高强度二硅酸锂。
各种透明度选择。

高强度二硅酸锂。
各种透明度选择。

PressCeramic



PressCeramic 是二硅酸锂玻璃陶瓷锭,用于传统压铸技术,制作高度美学的全瓷修复物。

高抗弯强度 (470MPa) 使其有广泛的适应症, 并作为第二前磨牙之前三单位牙桥的可靠选项。根据适应症和加工方式, 压铸锭有4种不同的半透明等级 (MO、LT、MT、HT) 和 2种乳光效果 等级。得益于优异的流动性, 能够实现高强度的薄贴面。仿真的乳光和透明度提供了与邻牙齿结构的最佳整合和 "变色龙效应"。

技术参数



类型
二硅酸锂玻璃陶瓷
(LS2)



抗弯强度
470 MPa
(典型平均值)



透明度
Opal、HT、MT、LT、MO




适应症
最多 3 单位牙
桥的贴片
(最多至第二
前磨牙)



加工技术
染色技术
削减技术
分层技术

亮点

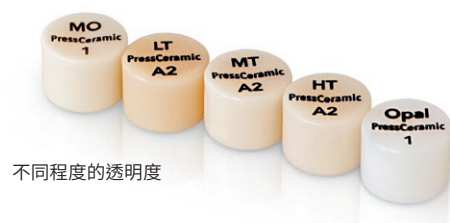

1 高抗弯强度和不同的透明度 广泛的适应症, 从薄贴片到三单位牙桥



2 仿真的乳光效果和透明度 与相邻牙齿结构的最佳整合：“变色龙效应”



变色龙效应

3 出色的流动性 能实现高强度薄贴片



优异的压铸效果

透明度概念

	Opal	HT	MT	LT	MO
		高透明度	中透明度	低透明度	中度不透明
加工工艺					
染色技术	●	●	●	●	
回切技术	●	●	●	●	
堆筑技术					●
适应症					
咬合面贴片 ¹	●	●	●		
薄贴片 ¹	●	●	●		
贴片	●	●	●	●	
镶体		●			
嵌体		●			
部分冠		●	●	●	
前/后牙冠			●	●	●
三单位牙桥 ²			●	●	●
混合支台齿			●	●	●
混合支台齿牙冠			●	●	

1 回切技术不得用于制造薄贴片和咬合贴片
2 作为远心支台齿仅适用至第二前磨牙

交货形式

填充包装	透明度	颜色
4 颗瓷锭, 每颗 3 克	Opal	1, 2
	HT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MT	BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
	LT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MO	0, 1, 2, 3, 4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com